

Objetivo:

Describir de manera práctica el modo de toma, acondicionamiento y remisión de muestras al laboratorio.

Alcance:

Todas las muestras que serán remitidas al laboratorio para su análisis.

Desarrollo:**Bacteriología:**

- Tomar muestras que incluyan tejido sano y afectado, en caso de ser posible, remitir todo el órgano.
- Utilizar UNA bolsa y/o colector para muestreo por cada órgano o tejido, no utilizar frascos de vidrio.
- Refrigerar en heladera por 6 horas previo al envío; en caso de enviarlas inmediatamente luego de tomadas, poner tanto volumen de refrigerante como de muestra. (continúa en Forma de envío)

Serología:

- Si se toman muestras de sangre con la misma jeringa y aguja, enjuagarlas con agua entre muestra y muestra y **escurrir el agua** para evitar hemólisis. Dejarlas reposar 3 horas a temperatura ambiente.
- Rotular cada tubo con la identificación del animal o la categoría. (continúa en Forma de envío)

Forma de envío

- Embalar en caja de Telgopor, con refrigerantes y papel de diario para evitar desplazamientos dentro de la caja. Evitar poner hielo ya que se derrite; en caso de no tener refrigerantes, congelar agua en botella de bebida de plástico.
- Poner dentro de la caja y dentro de una bolsa una breve reseña del material remitido (propietario, establecimiento, animal, categoría, signos, material enviado y estudio solicitado). A tal efecto se ruega completar el formulario **PRO 404 Reg. 02 Pedido de Determinaciones**.
- Rotular la caja por fuera, consignando Destinatario: **Llamas Laboratorio y Servicios – Jujuy 92 – Pergamino (B), TEL: 02477-445270**; y al pie: **Procedencia, remitente, dirección**.
- Enviar al laboratorio a la brevedad y avisar: lugar de despacho, transporte, número de guía y momento de envío.

Aclaración:

Un buen diagnóstico depende fundamentalmente de una buena toma de muestra.

El laboratorio no podrá hacerse responsable de los resultados obtenidos a partir de muestras mal extraídas.